

シルバーリフシでのお手入れ方法

【ご使用の手順】

1. お手入れを行う部分を清潔にします。
2. 足先～足首まで専用ジェル『リマゴ』をたっぷり塗布し塗りこみます。
3. シルバーリフシを履きます。



4. シルバーリフシにリード線を接続し、通電スタート！

《セル★ステラボディの場合：レベル3 ミラクルウェーブの場合：ボディレベル7～8》※体調やお好みによってレベルを下げていただいても大丈夫です。



5. 使用後は、必ず専用ジェル『ルトルス』でマッサージしてください。


シルバーリフシの洗濯方法

1. 洗濯ネットに入れて洗濯機（**弱水流**）または手洗いで洗ってください。

洗剤は**中性洗剤**（おしゃれ着用）をご使用ください。

※他の洗濯物と一緒に洗うと毛玉になる 可能性がりますので
単独で洗濯することをお勧めいたします。

2. 乾燥機での乾燥は避け、軽く脱水をした後は陰干しして下さい。

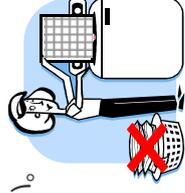

長くお使いいただく為に

- セル★ステラご使用時は専用化粧品をご使用下さい。
→油分等を含んだ化粧品のご使用はお控え下さい。劣化の原因となります。ご了承ください。
- 洗濯は**10回使用毎**を目安にして下さい。また、汚れが気になる場合や汗をたくさんかかれた場合に洗濯して下さい。