

ナノカレント機器 サポーターの正しい使い方

	グローブ	サポーター類	サポーター類
			
使い方	 <p>お水でしっかり濡らし やさしく縦絞りをした後 リフレッシューションを噴霧。 その後、トリートメント部位に リマーゴを たっぷり塗ります。</p> 	 <p>銀部分にリフレッシューションを噴霧し トリートメント部位に リマーゴを たっぷり塗ります。</p> 	 <p>トリートメント部位に リマーゴを たっぷり塗ります。</p>
使用回数	80回～100回	80回～100回	80回～100回
洗い方	 <p>毎回中性洗剤で やさしくもみ洗い</p>	<p>3回～4回、または1週間に1回 洗濯ネットに入れ 中性洗剤で弱水流で洗い 軽く脱水 ※汚れや使用頻度による</p> 	
通電確認方法	<p>【ミラクルウェーブの場合：通電チェッカーを使用】 BODYモード・レベル8に設定します。 左右のアタッチメントのリード線付近を通電チェッカーに挟み込むか 写真の様にまたがせます。 LEDが点灯すれば通電しています。 ※グローブの場合は指で挟む</p>   <p>【セル★ステラの場合：ショート検知機能搭載】 リード線のフック付近を 接触させて、画面に『short』と 表示されたら通電しています。</p>  		
注意点	<ul style="list-style-type: none"> ★機器使用前に他社化粧品を使用しないでください。 ★洗剤は必ず中性洗剤をご使用ください。（アルカリ性洗剤は劣化を早めます） ★柔軟剤の併用は、銀の劣化に繋がりますので、お止めください。 ★2週間以上使用しない時は、洗濯後しっかり乾かしてから、ビニール袋に入れて保管してください。（空気に触れた状態で長期間保管すると、銀が酸化し、劣化に繋がります） ★リード線は断線防止の為、縛る・本体に巻きつけるなどせず、大切に保管してください。 ★3ヶ月に1回のペースでドライクリーニングを行なっていただく 付着した皮脂を取り除き銀の劣化を防ぎます。 		